

MyFID[®]

DOSEDISPENSER

«Min fleksible individuelle dosering»
Bruksanvisning for MyFID[®] ved
Parkinsons sykdom.

Pasient



MyFID[®]-dosedispensern

MyFID[®]-dosedispensern holder oversikt over dosene dine, varsler deg når du skal ta neste dose og du kan registrere hvordan du føler deg.

Helt enkelt – din dose, din helse!

Les nøye gjennom manualen før du tar i bruk MyFID[®]. Hvis du har spørsmål om hvordan du bruker dosedispensern, kan du kontakte Navamedic AS.

På <https://myfid.se/filmer-och-manualer/> finner du instruksjonsvideoer som forklarer de viktigste punktene i denne manualen. Det vil være lurt å både se instruksjonsvideoene og gå nøye gjennom denne manualen.

Trenger du hjelp?

Kontakt Navamedic kundestøtte på telefon:
+47 67 54 93 54 eller via infono@navamedic.com
Du finner i tillegg informasjon og svar på vanlige spørsmål (Spørsmål og svar) på
<https://myfid.se/fragor-och-svar/>

MyFID[®]-dosedispensern

Nye MyFID[®] hjelper deg å stille inn det spesifikke behandlingsopplegget ditt med levodopa. I tillegg får du påminnelser når det er tid for å ta neste dose. Du og legen din kan på den måten bedre kontrollere Parkinsons sykdommen din.

I systemet inngår følgende:

- MyFID[®]-dosedispenser med batterilader
- Tilkoblingskabel mellom PC og MyFID[®]
- Kassett med Flexilev[®] (levodopa 5 mg / karbidopa 1,25 mg). Kassetter skrives ut av legen og hentes på et apotek.

OBS!

MyFID[®]-dosedispensern skal kun brukes med Flexilev[®]-tabletter.

Hvis du har spørsmål om medisineringsen din, kontakter du lege eller annet helsepersonell som har ansvar for behandlingen din.

MYFID®

Viktig informasjon om den nye dosedispensern:

- Den nye dosedispensern og Flexilev® er beregnet på og godkjent for behandling av Parkinsons sykdom. Før du kan ta i bruk MyFID®, må den stilles inn til deg. Dosedispensern programmeres av lege eller annet autorisert helsepersonell.
- Legen din har foreskrevet en levodopadosering som er skreddersydd til deg.
- Dato og tid er forhåndsinnstilt i dosedispensern. Kontroller og eventuelt juster tidsinnstillingen før du starter behandlingen.

Hvis du har spørsmål om dosedispensern, kan du kontakte helsestasjonen din eller gå inn på **www.myfid.se**. Alternativt kan du kontakte Navamedic på **info@navamedic.com** eller telefon **+47 67 54 93 54**.

Innhold

1. Beskrivelse av ikoner og funksjoner	6
2. Individuelle innstillinger	8
2.1 Se resepten din	8
2.2 Still inn påminnelseslyd	10
2.3 Still inn tid, dato og lyd	11
2.4 Påminnelse om dose	12
3. Kassetinformasjon	13
3.1 Hva inneholder kassetten?	13
3.2 Innsetting av kassett	14
4. Ta dose	15
4.1 Ta ordinære doser	15
4.2 Ta ekstradose	17
4.3 Årsak til ekstradose	19
4.4 Symptomregistrering	20
5. Statistikk	22
5.1 Vis statistikk	22
5.2 Velg statistikk	23
5.3 Eksporter data	25
6. Vedlikehold og feilsøking	26
6.1 Batteri	26
6.2 Rengjøring	27
6.3 Vedlikehold	28
7. Meldinger og feil	28
7.1 Skjermmeldinger	28
7.2 Feilsøking og tiltak	30
8. Service og kontakt	31
8.1 Kontaktinformasjon	31
9. Teknisk produktinformasjon	32
9.1 Begrensninger	32
9.2 Spesifikasjoner	33
9.3 Produktsikkerhetsinformasjon	34
9.4 Garanti og retur	35
10. Indeks	36

1. Beskrivelse av ikoner og funksjoner



SLIK FUNGERER DOSEDISPENSERN

- 1. På/av-knapp:** Slår på og av skjermen.
- 2. Hjem-symbol:** Angir startskjermbildet. Når det blir vist andre menyer, vil dette symbolet være byttet ut med en tilbake-pil.
- 3. Gjenværende medisin:** Viser hvor mange døgn medisinen rekker til med doseringen du har angitt.
- 4. Batterisymbol:** Viser batterinivået til MyFID®.
- 5. Dato og navn:** Kontrollerer at du har lagt inn riktig dato og navn. Navnet ditt legges inn av den som programmerer MyFID®.
- 6. Klokke:** Klokke med symboler som viser når du tok forrige dose, og når du skal ta neste.
- 7. Fylt ring = dosen er tatt:** Den fylte grønne sirkelen på klokka viser at dosen er tatt i tråd med skjemaet.
- 8. Ikke-fylt ring = tid for neste dose:** Grønne, ikke-fylte sirkler på klokka viser kommende doser de neste 6 timene.
- 9. Lyd:** Høytalerknapp for å slå på og av lyden.
- 10. Innstillinger:** Knapp for å tilpasse MyFID® og vise statistikk. Legen din eller en sykepleier programmerer her den individuelle medisineringsen din.
- 11. Neste dose (høyre):** Til høyre vises tiden for neste dose. Du kan trykke her for å ta dosen når det er 15 minutter eller mindre igjen av tiden til den skal tas.
- 12. Forrige dose (venstre):** Til venstre ser du når du tok forrige dose. Dette området er tomt frem til du har tatt første dose for dagen.
- 13. Ekstradose:** Knapp for ekstradose. Det er her mulig å ta ut kommende doser i forveien.
- 14. Batterilader:** Batteriladeren plugges inn i det runde hullet til venstre.
- 15. Tablettutmating:** Her kommer tablettene ut.
- 16. Mikro-USB-kontakt:** Brukes til å hente ut rapporter og behandlingsdata.



2. Individuelle innstillinger

2.1 SE RESEPTEN DIN

1. Start apparatet og trykk på  **PÅ/AV**-knappen. Startskjermen åpnes.
2. Trykk på symbolet for innstillinger. 
3. Trykk på doseringsskjemaet for å se doseringen du har fått foreskrevet. Her finner du den nåværende doseringen din.





4. Trykk på pilen oppe til venstre for å gå ut av doseringsskjemaet og komme tilbake til startskjermen.

5. Trykk på en av de grønne stolpene for å se dosestørrelse og tidspunkt for en bestemt dose.




6. Hvis du trykker på pilen til høyre, vises neste dose.

7. Når det blir vist en senere dose, kan du gå tilbake til en tidligere dose ved å trykke på pilen til venstre.

2.2 STILL INN PÅMINNELSESLYD



1. Trykk på knappen «Velg ...» på første skjerm-side, og velg deretter  **INNSTILLINGER** på menyen.
2. Trykk på Påminnelseslyd.
3. Velg ønsket påminnelseslyd, og trykk så på LUKK.

Lyd og vibrasjon bør til enhver tid være slått på, slik at du ikke går glipp av påminnelser om doseinntak.



OBS! Lydsymbolet på startskjermen må være slått på for at det skal spilles av lyd. Påminnelseslyd og vibrasjon bør til enhver tid være slått på, slik at du ikke glemmer en dose.

2.3 STILL INN TID, DATO OG LYD





1. Knappelyd: Her kan du velge om det skal komme lyd når knappene trykkes på.

2. Tid og dato:


Trykk på pilen og bruk knappene «+» og «-» for å legge inn riktig dato. Når du har stilt inn riktig dato, trykker du på **STILL INN** for å lagre innstillingene.

Trykk deretter på **NESTE** for å stille klokka.

Trykk en gang til på **STILL INN** for å lagre innstillingene, og trykk så på **NESTE** for å avslutte.

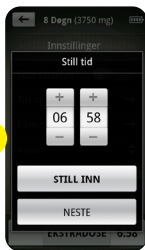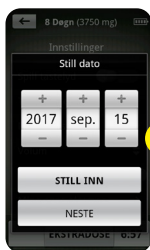



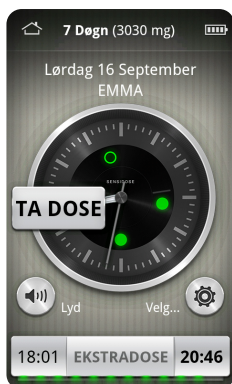

2.4 PÅMINNELSE OM DOSE




Når det er på tide å ta en dose, veksler skjermen mellom **TA DOSE** (alternativt **START**, hvis det er første dose for dagen) og **KLOKKESLETT**. **7:00 / TA DOSE**

MyFID® gir et lydsignal tre ganger med fem minutters mellomrom. Hvis du ikke tar dosen innen 15 minutter før eller etter det forhåndsprogrammerte klokkeslettet, blir dosen regnet som hoppet over.

Du kan selvsagt alltid ta en dose utenfor det forhåndsprogrammerte doseintervallet ved å velge **EKSTRADOSE**. Dosen vil bli registrert som ekstradose.

-  Dette symbolet viser dosen som er tatt.
-  Dette symbolet viser kommende doser som skal tas.
-  Dette symbolet viser at dosen ikke har blitt tatt.
-  Dette symbolet viser at det har blitt tatt en ekstradose.

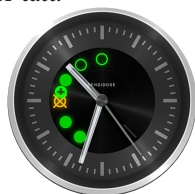

3: Kassetinformasjon

3.1 HVA INNEHOLDER KASSETTEN?

- Kassetten inneholder 750 minitabletter av legemidlet Flexilev®.
- Flexilev®-minitablettene inneholder virkestoffene levodopa og karbidopa.
- Hver minitablett inneholder 5 mg levodopa og 1,25 mg karbidopa.
- I en full kassett vil det være 3 750 mg levodopa.
- Hvis døgndosen din er 500 mg, varer en kassett i cirka en uke ($3750 \text{ mg} / 500 \text{ mg} = 7,5$ dager).
- Kassetten skrives ut på resept av lege.
- Du henter ut kassetten på apoteket.
- Kontakt legen din i god tid før det er tomt, slik at du kan få resept på nye kassetter og unngå stopp i behandlingen.

Ha alltid en kassett i reserve, f.eks. i tilfelle det må hentes tabletter fra to kassetter for at dosen skal bli fullstendig. Det er også lurt at du tar ut en dose på forhånd, slik at du har en i reserve. Du kan oppbevare denne i et rør du får fra Navamedic.

3.2 INNSETTING AV KASSETT

1. Her legger du inn kassetten.
Kassetten settes inn på baksiden av MyFID®.
2. Knapp for å åpne luken. Åpne luken ved å trykke på knappen på undersiden.
3. Når du tar en ny kassett, snur du den opp ned et par ganger for å løsne eventuelle fastkilte tabletter.
4. Dra også beholderen frem og tilbake noen ganger. Beholderen må være helt lukket når kassetten settes inn. Luken vil ellers ikke være mulig å lukke.
5. Det kan hende du må vri litt på tannhjulet i kassetten ved innsetting.



Steng luken ved å trykke lokket på plass til du hører et knepp. Vend på apparatet. MyFID® spør om det er en ny kassett eller en gammel. Dette gjør det mulig for MyFID® å beregne hvor mange tabletter som er igjen i kassetten, og hvor lenge den rekker.




4: Ta dose

4.1 TA ORDINÆRE DOSER

Vend apparatet opp ned før du tar ut en dose. Eventuelle fastkilte tabletter vil da løsne. Ha et glass med cirka 50–100 ml vann klart (cirka et halvt glass med vann).

1. Trykk på knappen som blinker med **TA DOSE** og klokkeslett. Du kan ta dosen 15 minutter før til 15 minutter etter det angitte klokkeslettet. Du kan også ta dosen ved å trykke på klokkeslettet til høyre på nedre rad som angir når dosen skal tas.

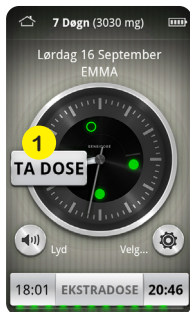

2. Det blir åpnet et nytt vindu. Juster dosen opp eller ned hvis du trenger det og legen har anbefalt det. Legen vil ha stilt inn hvor mye du har lov til å justere dosen med. Trykk deretter på **TA DOSE**. Hold MyFID® loddrett når du trekker ut tablettene. Tablettene føres frem og samles i en beholder i dosedispensern (oppsamleren).



Hold MyFID® loddrett når du trekker ut tablettene.

- 3.** Hold dosedispensern loddrett over et glass. Trykk på **MAT UT** for å la minitablettene mates ut i glasset/koppen. OBS! Hold dosedispensern loddrett inntil utmatingen er ferdig.

MERK:

Hold MyFID® loddrett mens tablettene mates ut.



- 4.** Tablettene løser seg opp innen 30 sekunder, og du får en løsning med et hvitt bunnfall. Rør rundt i glasset for å virvle opp bunnfallet, og drikk alt. Skyll gjerne med ytterligere 50 ml vann for å være sikker på at du får i deg hele dosen. Løsningen bør drikkes snarest.



Ved doser over 100 mg (dvs. flere enn 20 tabletter) mates det ut 20 tabletter om gangen. Du får da beskjed om å mate ut tablettene i to eller flere omganger. Følg instruksjonene på skjermen. Tablettene i andre omgang kommer først ut når du har trykket en gang til på MAT UT.

4.2 TA EKSTRADOSE


Av og til kan det hende du trenger mer medisin, men ikke har en skjemalagt dose å ta der og da. Det kan f.eks. være i forbindelse med trening eller annen aktivitet der legen din har anbefalt deg å ta en dose utover det ordinære skjemaet. I slike tilfeller kan du mate ut en ekstradose.

Legen vil ha foreskrevet styrken på ekstradosen din i MyFID®, og du kan justere dosen innenfor verdiområdet som legen har angitt. Følg anbefalingene fra legen når det gjelder antall ekstradoser.

1. Trykk på knappen **EKSTRADOSE**.

Med denne funksjonen kan du ta ut en ekstradose eller forhåndsdose. Du kan ta med deg bare tablettene uten MyFID®. MyFID® vil ikke gi noe lydvarsel for klokkeslett der dosen er hentet ut i forkant.

2. Velg om du vil ta ut en ekstradose eller neste dose på skjemaet.
3. Når det kommer opp et nytt vindu, trykker du på **TA DOSE**.
4. Følg instruksjonene i kapittel 3.1.

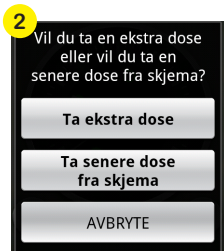

5. Minitablettene føres frem til beholderen i dosedispensern.



MERK:

Hold MyFID® loddrett mens tablettene mates ut.

6. Trykk på MAT UT for å la minitablettene mates ut i glasset/koppen. OBS! Hold dosedispensern loddrett inntil utmatingen er ferdig.



MERK: Doser som tas ut i forkant, skal først løses opp når det er tid for å ta dem. FREM TIL DEN TID OPPBEVARES DE SOM TABLETTER.

4.3 ÅRSÅK TIL EKSTRADOSE

MyFID® fører statistikk over dosene dine. Disse opplysningene er ment å skulle brukes som grunnlag for eventuelle fremtidige skjemaendringer. Hvis legen din har aktivert denne funksjonen, kan du derfor få følgende spørsmål når du henter ut en ekstradose: Hva var det som gjorde at du følte behov for en **EKSTRADOSE**?

Kanskje er ikke det ordinære faste doserings skjemaet tilstrekkelig tilpasset etter symptomene dine i løpet av dagen? Du kan også ta en ekstradose hvis du ikke rakk å ta normaldosene innenfor det foreskrevne tidsintervallet, eller hvis du av en eller annen grunn ikke har fått tatt en dose som har blitt matet ut.

1. Merk av for svaret ditt ved å trykke på ett eller flere alternativer, og trykk deretter på **SVAR**. Skjermbildet blir da lukket, og du kommer tilbake til startskjermen.
2. Hvis du velger «Annen grunn» og trykker på **SVAR**, får du seks svaralternativer du kan velge mellom før du trykker på **SVAR**.



4.4 SYMPTOMREGISTRERING

Dosedispensern kan være stilt inn på regelmessig registrering av symptomer, såkalte «Modaldager». Dette innebærer at du enkelte dager får spørsmål om hvordan du føler deg i forbindelse med doseinntaket.

1. Du kan ellers når som helst registrere bevegelsen din og andre symptomer ved å trykke på **SYMPTOMREGISTRERING**. Du kommer hit ved å trykke på innstillingsknappen (tannhjulet) på den første siden med klokka.



2. Ved registrering på modal-dager får du et spørsmål før dosen og 30 minutter etter at tablettene har blitt matet ut: «Hvordan er bevegeligheten din akkurat nå?». Svar ved å trykke med fingeren på skjermeskalaen, og trykk så på **SVAR**.



3. Du kan også angi ikke-motoriske symptomer du plages av akkurat nå. Velg opptil tre symptomer og trykk på **SVAR**. Angi alvorlighetsgraden for symptomene du har valgt, og trykk på **SVAR**.



5. Statistikk

5.1 VIS STATISTIKK

All informasjon om doser, manglende doser og symptomregistrering lagres i MyFID®.

Følg trinnene under for å se informasjonen:

1. Trykk på innstillingsknappen (tannhjulet) på den første siden med klokka, og trykk så på knappen **STATISTIKK**.
2. Trykk på knappen **UTVALG**.



Du kan her velge ulike måter å vise informasjonen din på. I tillegg kan du sammenligne ulike tidsrom. Når du er ferdig med å velge innstillinger, trykker du på **LUKK** for å få vist informasjonen på skjermen. Du kan gjenta prosessen over for å se informasjonen slik du ønsker.



5.2 VELG STATISTIKK

Ved å trykke på **NESTE** kan du få opp følgende informasjon:

1. Foreskrevet behandling.
2. Manglende doser i % per dosering.
3. Behandlingsresultat.
4. Symptomutfall, bevegelighet.

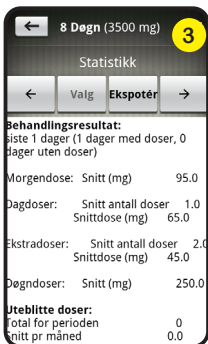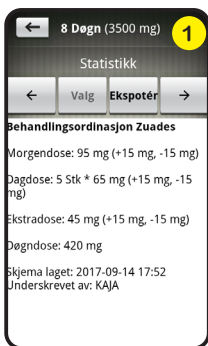

5. Symptomutfall, eget valg av symptom 1, f.eks. svette.
6. Symptomutfall, eget valg av symptom 2, f.eks. verk.
7. Symptomutfall, eget valg av symptom 3, f.eks. talevansker.
8. Statistikk over forordnede og innmatede symptomregistreringer.



Gå tilbake med **FORRIGE** inntil Utvalg-knappen begynner å lyse igjen. Du kan nå gjøre et nytt valg og se på statistikken som er beskrevet ovenfor.



5.3 EKSPORTER DATA

For at eksporten av data til PC-en skal gå smidig, er det viktig at du følger disse anvisningene nøye. Bruk den medfølgende kabelen fra MyFID® for å koble dosedispensern til USB-porten på PC-en.

Velg på MyFID® hvilket format dataene skal overføres i. CSV er et format som kan åpnes i regneark-programmer som f.eks. Excel.

1. Eksporter data for en valgt periode til en CSV-fil.
2. Eksporter alle data til en CSV-fil.



3. Hvis du velger «**Eksporter PDF-rapport**», får du en standardisert rapport som gir en oversikt over behandlingen og symptomene i den valgte perioden.
4. Etter at du har valgt ønsket rapport (CSV for en periode, CSV for alle data eller PDF-rapport), venter du på teksten under LUKK (rapport/mnt/sdcard xxx) og trykker deretter på ruten «**Koble til USB-stasjon**». Etterpå kan du åpne filen via Filutforsker på PC-en. Dataene vil være plassert under «**Flyttbar disk**» under Filutforsker-ikonet i Windows.
5. Lagre rapporten på datamaskinen eller skriv den ut. Når du er klar, merker du av for «**Koble til USB-stasjon**» og trykker på LUKK. Koble deretter fra kabelen fra datamaskinen og MyFID®.

6. Vedlikehold og feilsøking

6.1 BATTERI

MyFID® – viktig å vite

- Dosedispensern inneholder et oppladbart litiumpolymerbatteri.
- Batterisymbolet oppe til høyre viser når dosedispensern trenger å lades.
- Gjør det til en vane å lade dosedispensern hver natt.
- Hvis du får en advarsel på skjermen om «**Lavt batterinivå**», forsøker du å lade dosedispensern snarest.
- OBS! Apparatet skal ikke lades når du tar ut en dose.
- Koble fra ladekabelen ved doseuttak.
- Hvis MyFID®-batteriet er helt utladet og du trenger å ta en dose, lader du enheten i cirka 30 minutter.
- Ikke utsett dosedispensern for ekstrem varme/ kulde. MyFID® er beregnet på å skulle brukes ved temperaturer mellom 15 og 35 °C.
Oppbevaringstemperatur er -40 til +80 grader.
OBS! Uten kassetten med tablett.
Batteriet kan ikke lades hvis temperaturen er under 0 °C eller over 50 °C.
- Dosedispensern kan i nødsfall lades fra en PC eller mobiltelefonlader via mikro-USB-tilkoblingen. Dette tar imidlertid cirka 10 ganger så lang tid, og er ikke anbefalt av Navamedic. Det er imidlertid en løsning som kan brukes når det ikke er annen råd.

6.2 RENGJØRING

NB!

- Pass på at MyFID® ikke mistes i bakken, ripes opp eller utsettes for mekanisk trykk. Skjermen er laget av glass.
- Hvis overflaten av skjermen blir tilsmusset, puster du på skjermen og tørker forsiktig over med en myk, tørr klut.
- Vær oppmerksom på at skjermen ikke skal rengjøres med vann eller andre løsninger enn skjermrengjøringsmidler (alle vanlige typer skjermrengjøringsmidler kan benyttes).

SLIK TAR DU GODT VARE PÅ PRODUKTET:

- Unngå at det kommer inn fukt der kassetten skal være.
- Rengjøring av kassettrommet:
Hvis det er mye tablettstøv i kassettrommet, kan det være lurt å gjøre det rent. Ta en tørr tøyfille eller mikrofiberklut og tørk forsiktig i åpningen der kassetten er plassert, og oppå den svarte sensorbeskyttelsen. Hvis kassettrommet er skittent, kan du fukte fillen lett med skjermrengjøringsmiddel (alle vanlige skjermrengjøringsmidler kan benyttes). Rengjør deretter innsiden av lokket på samme måte.
- OBS! Ikke fukt rengjøringskluten med vann. Aldri fukt det tilsmussede området direkte. Fukt alltid kluten med skjermrengjøringsmiddel, og rengjør med denne.
- Ikke spray rengjøringsløsning direkte på dosedispensern.
- Ikke hold dosedispensern under vann eller annen væske.

- Ikke hell værke i dosedispensern eller på skjermen.
- Ikke sitt på den (ikke ha den i baklommen eller lignende).

6.3 VEDLIKEHOLD

Ved normal bruk trenger dosedispensern minimalt vedlikehold, om i det hele tatt. Dosedispensern kjører en selvtest hver natt, og viser en melding hvis noe er galt. (Se «Skjermmeldinger» i kapittel 7 for mer informasjon om feil og hvordan de kan løses.)

Kontakt lege eller sykepleier hvis du har problemer med dosedispensern.

7. Meldinger og feil

7.1 SKJERMELDINGER

Aldri ta behandlingsbeslutninger basert på en feilmelding. Hvis du har spørsmål om behandlingen din, kontakter du legen som har ansvaret for å følge deg opp. Navamedic (tlf. +47 67 54 93 54) kan svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om MyFID®.

Lavt batterinivå

Tiltak: Lad dosedispensern snarest.

Lavt medisinnivå

Denne meldingen kommer opp når den resterende mengden Flexilev® kun rekker til 1 eller 2 dager.

Tiltak: Sørg for at du har en ny kassett tilgjengelig.

Bytt kassett

Når det er tomt for tabletter, kommer det opp en melding om at det må byttes kassett. MyFID® gir ut alle tablettene i kassetten. Hvis du trenger ytterligere tabletter for å få hele dosen, tas disse fra den nye kassetten. MyFID® holder styr på antallet tabletter. Du får i dette tilfellet to utmatninger: én fra den gamle og én fra den nye kassetten.

Manglende dose

Denne informasjonen forsvinner når det tas en ekstradose eller det er tid for å ta neste dose. Hvis du hoppet over en dose, kan du ta en ekstradose i stedet.

Avbrutt dose

Dosedispensern kunne ikke levere riktig dose. Følg anvisningene på skjermen. Dosedispensern veileder deg til en ny riktig dose.

Teknisk feil

Dosedispensern kjører en selvtest hver natt. Hvis det blir vist en melding på skjermen om teknisk feil, kontakter du lege/sykepleier eller Navamedic.

Dosen kan ikke tas

Dosedispensern kan ha problemer med å mate ut tabletter, uten at det er feil på selve automaten. Dette kan ha to årsaker: Tablettene har dannet en «bro» inni kassetten, eller en fastkilt tablett blokkerer for utmatningen. I slike tilfeller iverksetter dosedispensern en rekke tiltak for å sikre at du får riktig dose. Enkelte av disse krever handling fra din side. Du må da følge instruksjonene som blir vist på skjermen.

7.2 FEILSØKING OG TILTAK

MyFID® slår seg ikke på eller skjermen er svart

Lad dosedispensern, fortrinnsvis over natten.

Hvis dette ikke hjelper, kontakter du Navamedic AS på telefon +47 67 54 93 54.

Batterinivået er lavt

Batterisymbolet viser kun én strek. Lad dosedispensern snarest mulig.

Lavt antall tabletter i kassetten

Det må settes inn en ny kassett i løpet av dagen.

Bytt kassett

Åpne luken bak, ta ut den gamle kassetten og sett inn en ny. Pass på at beholderen (oppsamlere) som mater ut tablettene, er helt inne når du setter inn en ny kassett.

En tablett har kilt seg

Følg instruksjonene på skjermen. Hvis instruksjonene er vanskelige å følge, tar du ut kassetten, setter inn en ny og begynner å medisiner som vanlig med den nye kassetten.

Skjermen starter ikke når den grønne PÅ-knappen trykkes på

Hold inne PÅ-knappen i 10 sekunder. Koble deretter til laderen. Vær oppmerksom på at det kan ta noen minutter før enheten starter på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kontakter du Navamedic AS på telefon +47 67 54 93 54.

Det er ikke mulig å eksportere statistikk

På hjemmesiden myfid.se/filmer-och-manualer/ finner du en instruksjonsvideo og detaljert beskrivelse av hvordan du går frem. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte Navamedic AS.

8. Service og kontakt

8.1 KONTAKTINFORMASJON

Service for MyFID®

Skal kun utføres av Navamedic AS eller et serviceverksted som er autorisert av Navamedic AS. Kontakt Navamedic AS ved behov for service:

Telefon: +47 67 54 93 54

Man–fre: 9.00–17.00

E-post: infono@navamedic.com

9. Teknisk produktinformasjon


9.1 BEGRENSNINGER

Les pakningsvedlegget som følger med Flexilev®. Her finner du oppdatert informasjon om produktspesifikasjoner og begrensninger.

Risiko for feildosering

MyFID® har i tester oppfylt minimumskravet om høyeste risiko for feilberegning på en tablett av 750.

Bruk MyFID®-dosedispensern kun slik det beskrives i denne bruksanvisningen. Hvis produktet brukes på andre måter enn som beskrevet i bruksanvisningen, kan det gå ut over sikkerheten din.

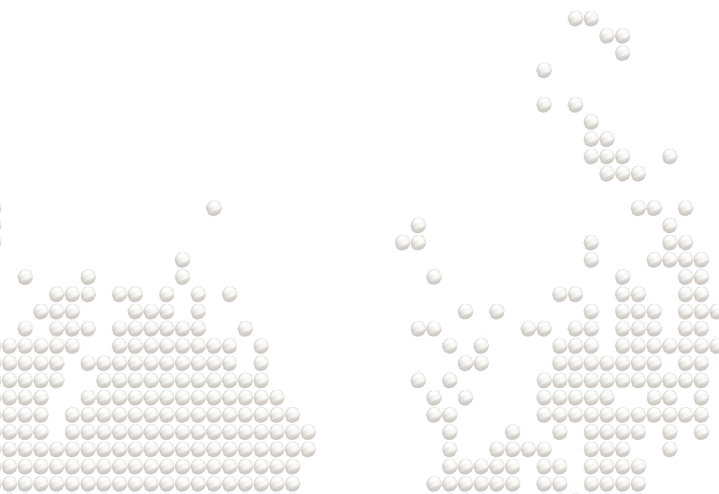

9.2 SPESIFIKASJONER

Strømforsyning

5 V DC 1,5A

Batteri

Oppladbart litiumpolymerbatteri 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Oppbevaring av dosedispensern

MyFID® skal oppbevares tørt, og er beregnet på å brukes ved temperaturer mellom 15 og 35°C.

Anbefalt oppbevaringstemperatur for legemidlet står på kassetten. Dosedispensern og kassetten skal oppbevares utilgjengelig for barn.

9.3 PRODUKTSIKKERHETS- INFORMASJON

Forklaring av symbolene

På emballasjen, typeskiltet og i bruksanvisningen for MyFID®-dosedispensern kan du støte på følgende symboler. De blir her vist sammen med en forklaring.



Dette produktet innfrir kravene til CE-merking av medisinsk utstyr iht. direktiv 2017/745 (MDR). Tallet 2862 angir kontrollorganet.



Skal ikke kastes i restavfallet. Batteriet/MyFID® skal leveres inn til et innsamlingssted som tar imot denne typen produkter, eller sendes tilbake til leverandøren.



5 V DC 1,5A

Strømmen og spenningen som batteriet lades med.



myfid.se/ifu

Les bruksanvisningen før du tar i bruk det medisintekniske utstyret. Du finner instruksjoner for bruk også på nett.



Angir produsentens referanse for å identifisere det medisintekniske utstyret.



Angir serienummeret for det medisintekniske utstyret.



Viser at instrumentet anses som medisintekniske utstyr.



Viser at instrumentet skal oppbevares ved temperaturer mellom 15 °C og 35 °C.



Angir produsenten av det medisintekniske utstyret.



Beskytt det medisintekniske utstyret mot fukt.

9.4 GARANTI OG RETUR

Service

Hvis MyFID® ikke fungerer tilfredsstillende, kontakter du Navamedic for eventuell service. Navamedic vil forklare hvordan du returnerer produktet. Ta alltid vare på emballasjen og eventuelt tilbehør som skal følge med hvis MyFID® skal byttes.

Garanti

De lovfestede garantivilkårene for forbruksvarer i innkjøpslandet gjelder.

Retur av MyFID®

Hvis du ikke lenger skal bruke MyFID®, gir du den tilbake til legen eller kontakter Navamedic for returhåndtering.

INDEKS

Batteri	26	Rengjøring	27
Skjerm	7, 28	Service	31
Feilsøking	30	Skjermmeldinger	28, 29
Flexilev	13	Spesifikasjoner	33
Garanti	35	Statistikk	22, 23
Kassetten	14	Symboler	34
Kassettluken	14	Symptomregistrering	20
Oppsamler	14	Ta dose	15
Klokkeslett	11	Teknisk informasjon	32
Lyd	10	Tid	10
MyFID	6, 7	Vedlikehold	28
Påminnelseslyd	10		

Navamedic AS
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo, Norge

Service for MyFID®
Telefon: +47 67 54 93 54
Man–fre: 9.00–17.00
E-post: infono@navamedic.com



Sensidose® AB

Gårdsvägen 8, 169 70 Solna, Sverige

Telefon: +46(0)10-707 73 80

Man-Fre: 9.00 -17.00

E-post: info@sensidose.se

MyFID[®]

36-3TD003B1-NO-05 2024-08-09

